

イマココアプリ

【 スマートフォン向けイマココアプリ(Android版) 取扱説明書 】



株式会社 **チェリー・BPM**

2019.3.11版

イマココアプリとは

始めに

GPキューブを身に着けた大切な人が、家を出たことをお知らせしたり、今どこにいるのか簡単に確認することができるスマートフォンアプリです。

複雑な操作が苦手な方でも安心してご利用いただけるように、わかりやすいシンプルな構成となっております。



目次

イマココアプリ簡単説明 … P. 1

インストールをおこなう … P. 3

みまもる方の位置を確認する … P. 11


お知らせや通知を確認する … P. 14

用語集 … P. 15

イマココアプリ簡単説明①

GPSが搭載されたGPキューブを身に着けている、みまもる方を簡単に選ぶことができます。

通知マークを表示することで、お知らせが届いたのか簡単に分かります。

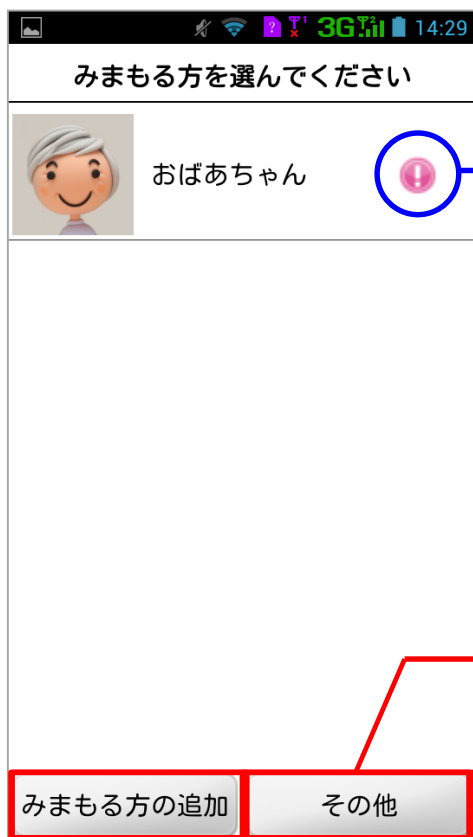

通知マーク

GPキューブから、新しい通知が届いているときに表示されます。
(プッシュ通知の利用の場合)

みまもる方一覧

登録しているみまもる方の一覧です。
タッチすると最後に測位できた、みまもる方の居場所を表示する地図画面へ移ります。

その他

管理者(チェリー・BPM)からのお知らせやイマココの紹介画面を参照することができます。


みまもる方の追加

みまもる方を追加できます。

イマココアプリ簡単説明②

GPキューブを身に着けている、みまもる方の位置が地図上に表示されます。

最新の位置のみならず、前回、前々回といった過去の測定位置も最大9件まで同時に確認することができます。

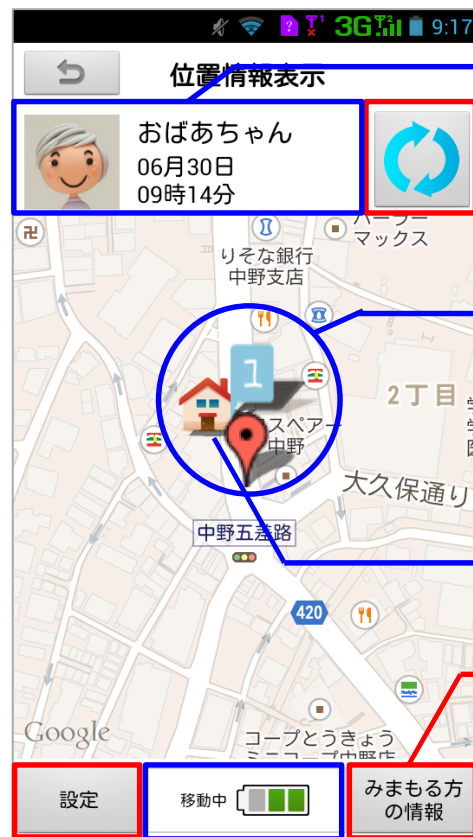

みまもる方の情報

みまもる方の名前、画像、および最新の位置情報を測位した日時が表示されます。

位置情報更新

みまもる方の居場所を測位します。

位置情報マーク

最新の位置は、赤色のピンで表示されます。
前回位置、前々回位置は数字入りの水色の旗で表示されます。

ピン、および旗にタップ(タッチ)しますと住所や測位日時が表示されます。

お住まいマーク

みまもる方のお住まいは、家のマークで表示されます。

みまもる方の情報

みまもる方が身に着けているGPキューブからのお知らせが一覧で確認することができます。

GPキューブ情報

みまもる方が身に着けているGPキューブの状態が表示されます。

設定

GPキューブの設定を変更できます。

イマココアプリ簡単説明③

GPキューブからののお知らせを一覧で確認することができます。一覧には50件までの履歴が表示されます。




お知らせ一覧

みまもる方が身に着けているGPキューブからのお知らせを一覧で表示されます。過去50件まで一覧表示されます。

GPキューブの状態

GPキューブの状態、電池残量を表示します。GPキューブの状態は、「移動中」、「停止中」、「充電中」、「受信できません」の四段階です。

電池残量は、以下のアイコンで表示されます。

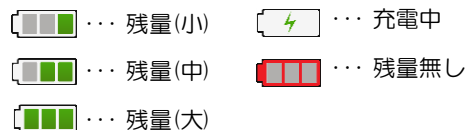

イマココアプリ簡単説明④

契約情報の確認、みまもる方の登録内容を変更することができます。また、アプリやGPキューブの設定を自由にカスタマイズすることができます。



設定メニュー

アプリやGPキューブの設定を変更できます。

〈お客様番号・セキュリティコードの確認〉
お客様番号、セキュリティコードを確認できます。

〈みまもる方の情報変更〉
みまもる方の情報を変更します。

〈移動・履歴表示の変更〉
地図上に表示する履歴の表示数や最終測位地を中心とした円表示の有無を設定します。

〈通知設定の変更〉
GPキューブからのお知らせの通知を設定します。

〈ログイン時 パスワードの設定・変更〉
イマココアプリへログインする時のパスワードを設定できます。

〈GPキューブの再起動〉
GPキューブを再起動します。

〈高度な設定〉
GPキューブの特殊な設定を変更できます。

※ 「GPキューブの再起動」「高度な設定」は子機では表示されません。
(子機の説明に関しましては、末尾の用語集をご参照ください。)

インストールをおこなう


イマココアプリをインストールする際の操作です。

Playストアで『イマココアプリ』をダウンロードしてください。
チェリーのマークが目印です。

※「イマココアプリ」で検索すると見つけやすいです。

ダウンロードが完了したら、イマココアプリを起動してください。

A-①

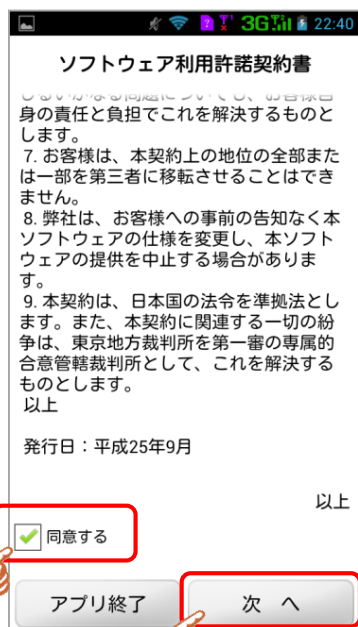

内容を確認して、「同意する」にチェックを入れてください。
チェックを入れましたら、『次へ』をタッチしてください。

A-②




アプリの簡単な紹介になります。
確認されましたら順次『次へ』をタッチしてください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。



イマココアプリをインストールする時の操作です。


B-④

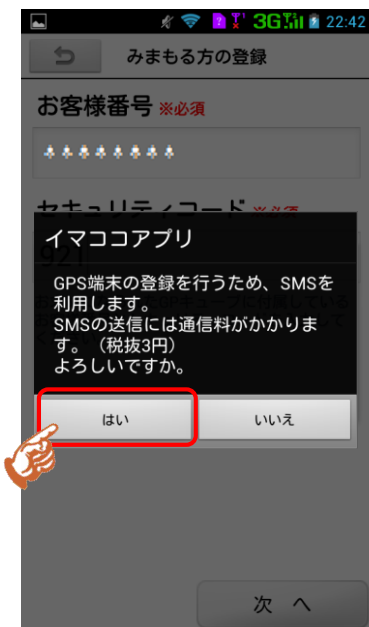

『はい』をタッチします。

SMS（ショートメッセージ）を利用しているため、3円(税抜)の通信料がかかります。

B-⑤

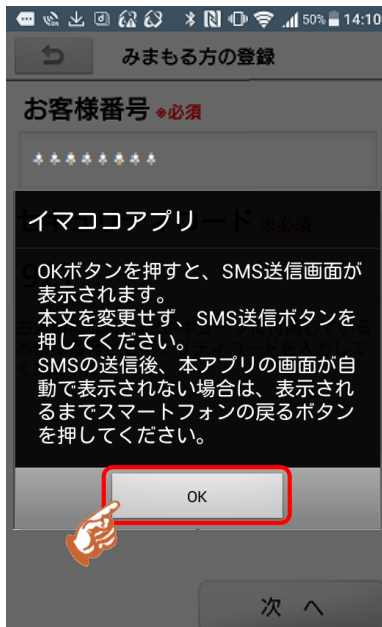

『OK』をタッチします。

B-⑥




SMSのアプリが立ち上がります。
(SMSのアプリ画面の見た目は、スマートフォンにより異なります)
入力されている本文を変更せずにそのまま 送信ボタンをタッチしてください。

送信ボタンがグレイアウトしていて押せない場合は、本文部分や送信履歴部分をタッチしていただくと押せるようになります。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-⑦

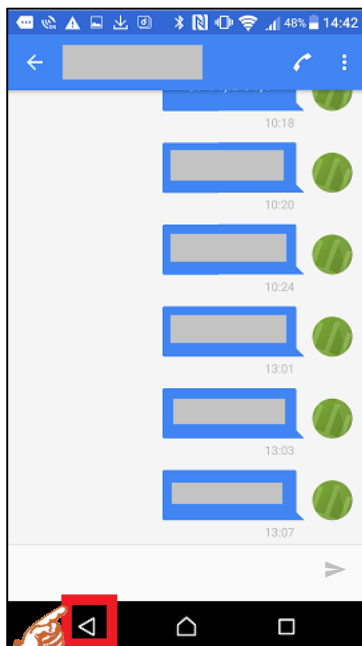

B-⑧の画面が自動で表示されない場合は、スマートフォンの戻るボタンをタッチします。
(戻るボタンの見た目や位置は、スマートフォンにより異なります)

※B-⑧の画面が表示されるまで、スマートフォンの戻るボタンを押してください。


B-⑧



『はい』をタッチします。

B-⑨の画面が表示されるまで少々時間がかかります。


B-⑨

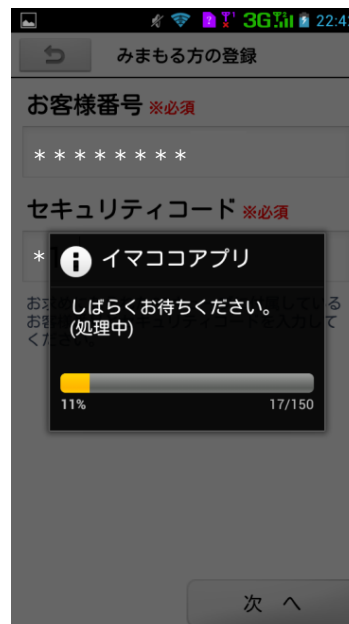

しばらくお待ちください。
最大150秒かかります。

電波の状況により、認証に失敗することがあります。
その場合、電波の届きやすい場所へ移動し、再度実行してください。

B-⑩

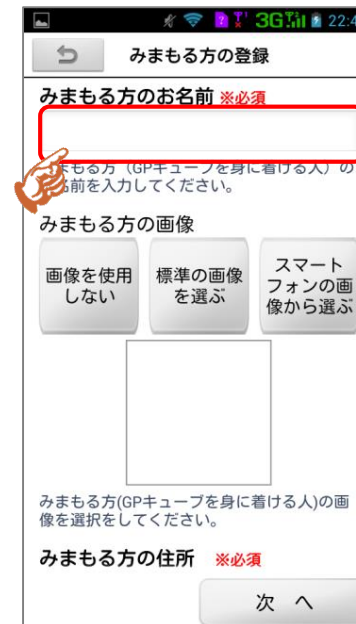

「みまもる方のお名前」欄に名前を入力してください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-⑪

みまもる方の画像を選択してください。

B-⑫

上記は、「標準の画像を選ぶ」を選択した場合です。
今回は、おばあちゃんを選択します。

B-⑬

選択した画像が画面の中央に表示されます。

B-⑬ ~ B-⑲ の操作は子機の登録時には必要ありません。
子機の登録をされている場合は、画面右下の『登録』をタッチしてください。登録が完了すると、B-⑳ の画面が表示されます。

B-⑭

下へスクロールして、「みまもる方の住所」欄に住所を入力してください。番地までの入力で構いません。
入力を終えたら、『次へ』をタッチしてください。

『次へ』をタッチしても、「住所が見つかりません」のメッセージが表示されて先に進まない場合は、スマートフォンを再起動させ、最初から入力し直してください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-⑮




ピンの位置を確認してください。位置が正しくない場合は、正しい位置をタッチしてください。ピンが移動します。確定しましたら、『決定』をタッチしてください。

B-⑯



確認画面です。表示されている「お名前」、「住所」、地図上のピンの位置に間違いがなければ、『登録』をタッチしてください。


B-⑰

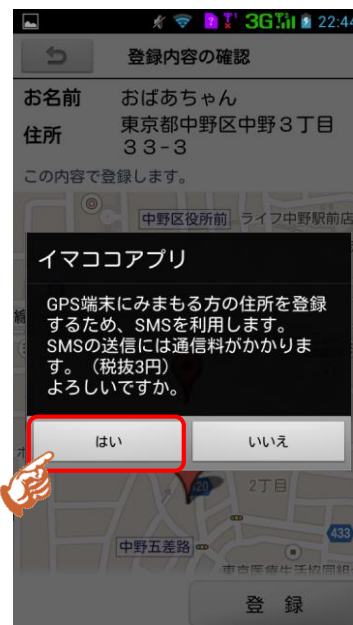

『はい』をタッチします。

SMS (ショートメール) を利用しているため、3円(税抜)の通信料がかかります。

B-⑱

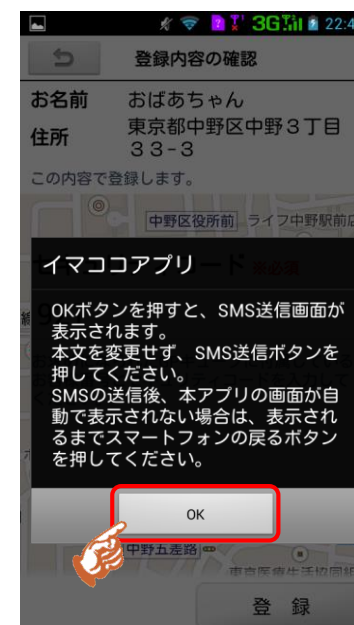

『OK』をタッチします。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-⑱




プッシュ通知の利用有無です。『利用する』もしくは『利用しない』を選択してください。あとで変更は可能です。

今回は、『利用する』を選択します。

※プッシュ通知の説明に関しましては末尾の用語集をご参照ください。


B-⑳

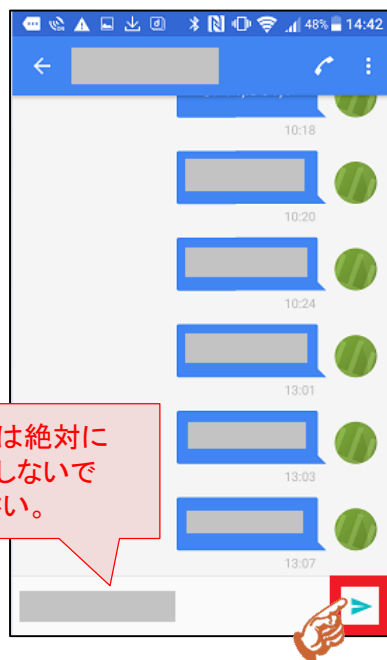

SMSのアプリが立ち上がります。(SMSのアプリ画面の見た目は、スマートフォンにより異なります)
入力されている本文を変更せずにそのまま 送信ボタンをタッチしてください。

送信ボタンがグレーアウトしている場合は、本文部分や送信履歴部分をタッチしていただくと押せるようになります。

B-㉑

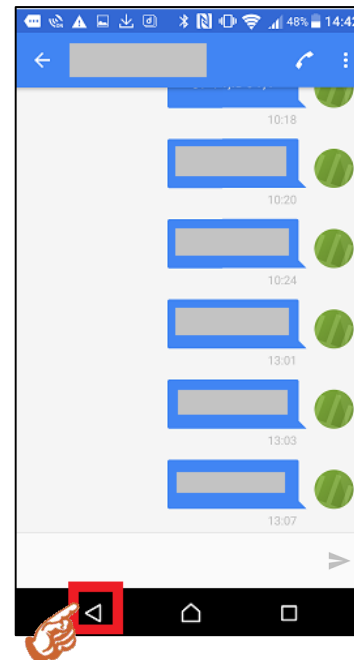

B-㉒の画面が自動で表示されない場合は、スマートフォンの戻るボタンをタッチします。(戻るボタンの見た目や位置は、スマートフォンにより異なります)

※B-㉒の画面が表示されるまで、スマートフォンの戻るボタンを押してください。

B-㉒




『はい』をタッチします。

B-㉓の画面が表示されるまで少々時間がかかります。

イマココアプリをインストールする時の操作です。


B-⑳

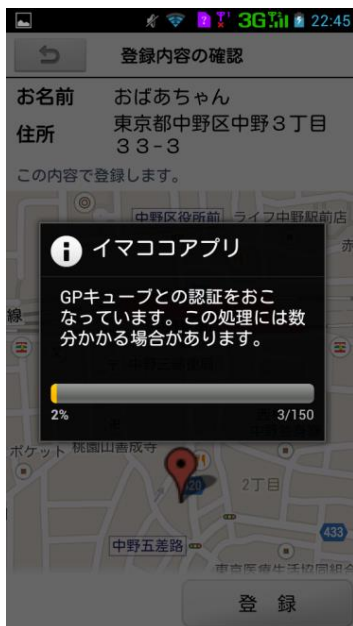

しばらくお待ちください。
最大150秒かかります。

電波の状況により、認証に失敗することがあります。
その場合、電波の届きやすい場所に移動し、再度実行してください。

B-㉑

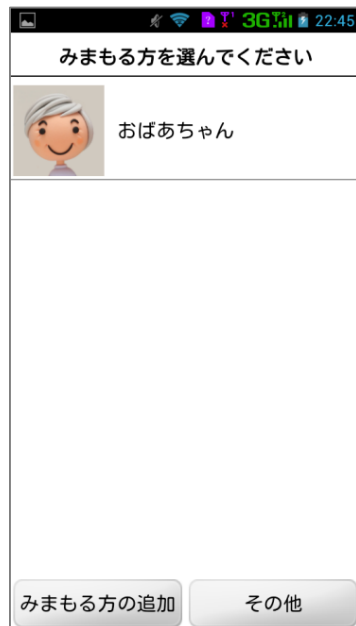

登録されました。一覧画面に追加されます。


※ 更にGPキューブを身に着ける方を登録する場合は、『みまもる方の追加』をタッチしてください。
P4「B-③」より同一の操作で登録ができます。

位置を確認する

位置を確認するには

みまもる方の最終測位の位置を地図上に表示します。

①

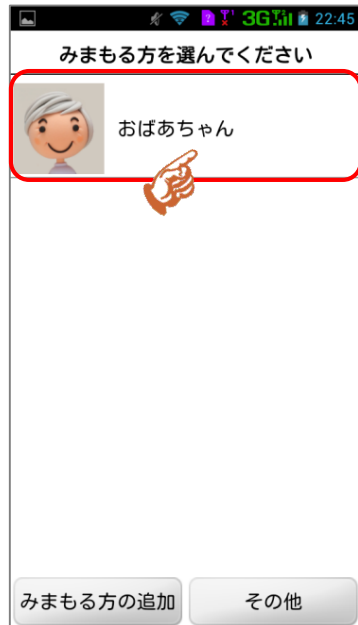

位置を確認したい、みまもる方をタッチしてください。

②



最終測位した位置情報が表示されます。

※ GPキューブが最後に測位できた居場所を地図に表示しています。現在の位置ではありません。

※ GPキューブの電波状況、周囲の建物など測位環境により、実際の位置が大きくずれる場合があります。

【補足説明】

- みまもる方の住所 …
- 最終測位地点 …
- 過去履歴地点 …

過去履歴は、表示有無を設定することができます。
表示は0件から最大9件です。

位置を測位し直すには


みまもる方の居場所を測位し直します。

C-①



右最上部にある、更新マークをタッチしてください。


C-②

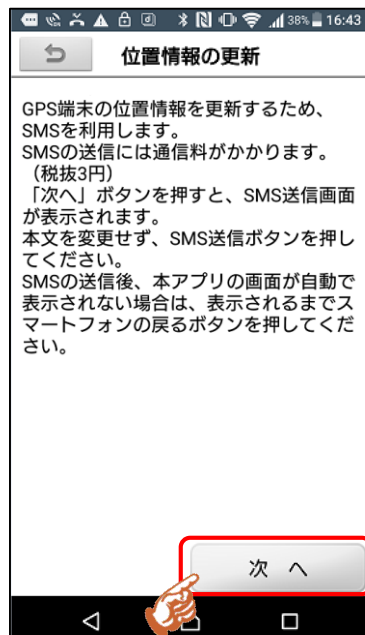

『次へ』をタッチします。

SMS（ショートメール）を利用しているため、3円（税抜）の通信料がかかります。


C-③

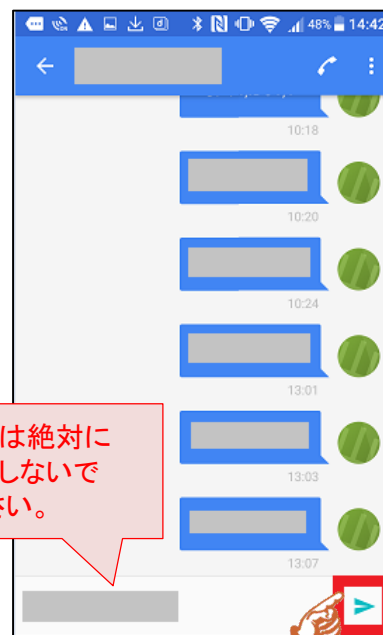

SMSのアプリが立ち上がります。
（SMSのアプリ画面の見た目は、スマートフォンにより異なります）
入力されている本文を変更せずにそのまま
送信ボタンをタッチしてください。

送信ボタンがグレーアウトして押せない場合は、本文部分や送信履歴部分をタッチしていただくと押せるようになります。

C-④

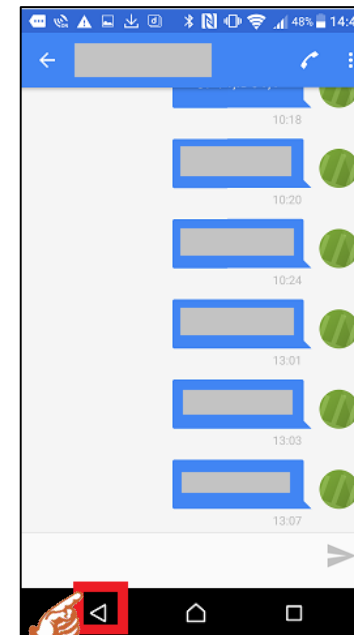

C-⑤の画面が自動で表示されない場合は、スマートフォンの戻るボタンをタッチします。
（戻るボタンの見た目や位置は、スマートフォンにより異なります）

※C-⑤の画面が表示されるまで、スマートフォンの戻るボタンを押してください。

位置の確認・連絡

みまもる方の居場所を測位し直します。

C-⑤



『はい』をタッチします。

C-⑥の画面が表示されるまで
少々時間がかかります。

C-⑥



測位中です。しばらくお
待ちください。

C-⑦



測位できた場合は、測位
された位置情報が表示さ
れます。
測位できなかった場合は、
表示される位置情報は変
わりません。

※ GPキューブの電波状況により
測位に失敗する場合があります。
この場合、GPキューブを身に
着けた方が、電波状況の良い
場所に移動しない限り、測位
できません。

※ GPキューブの電池残量が無いと
測位することができません。

お知らせ／通知を確認する

GPキューブからのお知らせを確認するには GPキューブからのお知らせを確認します。



お知らせを確認したい
みまもる方をタッチしてく
ださい。

『みまもる方の情報』を
タッチしてください。

お知らせが新着順に一覧
で表示されます。
(過去50件まで)

【補足説明】



プッシュ通知を「利用する」にしている場合は「！マーク」で、
お知らせがあることを通知してくれます。

こんなときにGPキューブから通知が届きます

- 各種設定で設定した内容が、GPキューブに反映されたとき
(プッシュ通知による通知はありません)
- GPキューブの電池残量がわずかになったとき
- GPキューブの電源が入ったとき
- GPキューブがリセットされたとき、再起動したとき
(電源が入ったときと、同じメッセージになります)
- GPキューブを充電し始めたとき
- みまもる方が移動し始めたとき
- みまもる方が設定時間以上、移動していないとき
- みまもる方が自宅に近付いたとき
- みまもる方が遠出したとき
- みまもる方が長時間外出しているとき

用語集

「親機・子機」とは？


「親機」とは・・・

「親機」はGPキューブの設定をおこなうことができるスマートフォンです。GPキューブ（みまもる方）を最初に登録したスマートフォンが、親機になります。一つのGPキューブに対して一台のスマートフォンしか親機になることができません。

「子機」とは・・・

「子機」は親機同様に、位置情報やお知らせを確認したり、通知を受け取ったりすることはできます。しかし、GPキューブの設定をおこなうことはできません。GPキューブ（みまもる方）を登録した際、すでに他の方によって登録されていた場合は、自動的に子機になります。一つのGPキューブに対して何台でも子機を登録することができます。

【使用例】

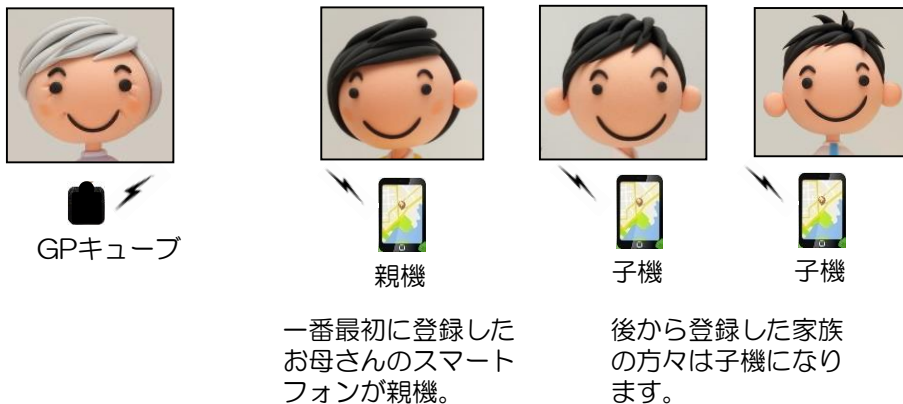

「プッシュ通知」とは？

イマココアプリを起動していないときでも、GPキューブからのお知らせを教えてください。「通知する」、「通知しない」の変更は、いつでも可能です。

