

イマココアプリ

【スマートフォン向けイマココアプリ（iPhone版）取扱説明書】



株式会社 **チェリー・BPM**

2014.12.05版

イマココアプリとは

はじめに

GPキューブを身に着けた大切な人が、家を出たことをお知らせしたり、今どこにいるのかを簡単に確認することができるスマートフォンアプリです。

複雑な操作が苦手な方でも安心してご利用いただけるように、わかりやすいシンプルな構成となっております。



目次

イマココアプリ簡単説明 … P.1

インストールをおこなう … P.3

みまもる方の位置を確認する … P.10


お知らせや通知を確認する … P.13

用語集 … P.15

イマココアプリ簡単説明①

GPSが搭載されたGPキューブを身に着けている、みまもる方を簡単に選ぶことができます。

通知マークを表示することで、お知らせが届いたのか簡単に分かります。

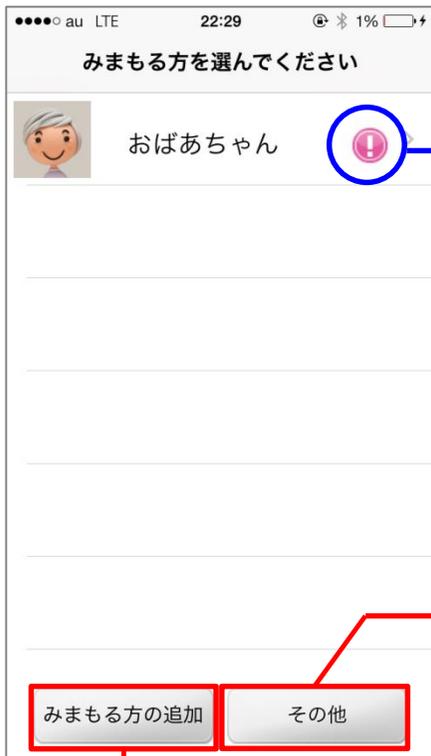

通知マーク

GPキューブから、新しい通知が届いているときに表示されます。
(プッシュ通知の利用の場合)

みまもる方一覧

登録しているみまもる方の一覧です。タッチすると最後に測位できた、みまもる方の居場所を表示する地図画面へ移ります。

その他

管理者(チェリー・BPM)からのお知らせやイマココの紹介画面を参照することができます。

みまもる方の追加
みまもる方を追加できます。

イマココアプリ簡単説明②

GPキューブを身に着けている、みまもる方の位置が地図上に表示されます。

最新の位置のみならず、前回、前々回といった過去の測定位置も最大9件まで同時に確認することができます。



みまもる方の情報

みまもる方の名前、画像、および最新の位置情報を測位した日時が表示されます。

位置情報更新

みまもる方の居場所を測位します。

位置情報マーク

最新の位置は、赤色のピンで表示されます。前回位置、前々回位置は数字入りの水色の旗で表示されます。

ピン、および旗にタップ(タッチ)しますと住所や測位日時が表示されます。

お住まいマーク

みまもる方のお住まいは、家のマークで表示されます。

みまもる方の情報

みまもる方が身に着けているGPキューブからのお知らせが一覧で確認することができます。

GPキューブ情報

みまもる方が身に着けているGPキューブの状態が表示されます。

設定

GPキューブの設定を変更できます。

イマココアプリ簡単説明③

GPキューブからののお知らせを一覧で確認することができます。一覧には50件までの履歴が表示されます。

予め設定した連絡先に最新の居場所を連絡することができます。



お知らせ一覧

みまもる方が身に着けているGPキューブからのお知らせを一覧で表示されます。過去50件まで一覧表示されます。

GPキューブの状態

GPキューブの状態、電池残量を表示します。GPキューブの状態は、「移動中」、「停止中」、「充電中」、「受信できません」の四段階です。

電池残量は、以下のアイコンで表示されます。



連絡先に通知

予め登録した連絡先の方へ最新の位置情報をSMSやeメールで通知します。

イマココアプリ簡単説明④

契約情報の確認、みまもる方の登録内容を変更することができます。アプリの設定、GPキューブの設定を自由にカスタマイズすることができます。



設定メニュー

アプリやGPキューブの設定を変更できます。

〈お客様番号・セキュリティコードの確認〉

お客様番号、セキュリティコードを確認できます。

〈みまもる方の情報変更〉

みまもる方の情報を変更します。

〈移動・履歴表示の変更〉

地図上に表示する履歴の表示数や最終測位地を中心とした円表示の有無を設定します。

〈通知設定の変更〉

GPキューブからのお知らせの通知を設定します。

〈連絡先の設定・変更〉

あなた以外に位置情報を教えたい方を登録したり、削除したりすることができます。

〈ログイン時 パスワードの設定・変更〉

イマココアプリへログインする時のパスワードを設定できます。

〈GPキューブの再起動〉

GPキューブを再起動します。

〈高度な設定〉

GPキューブの特殊な設定を変更できます。

※ 「GPキューブの再起動」「高度な設定」は子機では表示されません。

(子機の説明に関しましては、末尾の用語集をご参照ください。)

インストールをおこなう


イマココアプリをインストールする際の操作です。

App Storeで『イマココアプリ by チェリー・BPM』をダウンロードしてください。

チェリーのマークが目印です。

ダウンロードが完了したら、イマココアプリを起動してください。

※「イマココアプリ」で検索すると見つけやすいです。

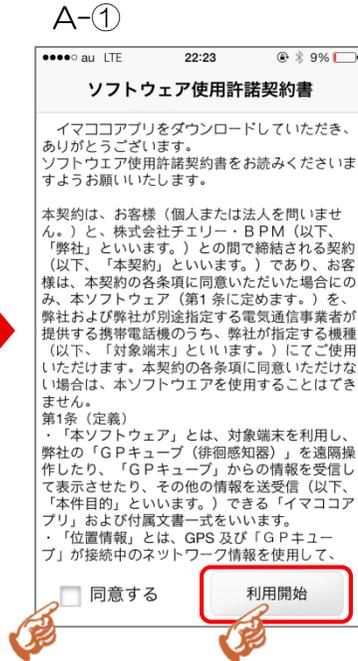


内容を確認して、「同意する」にチェックを入れてください。
チェックを入れましたら、『利用開始』をタッチしてください。



アプリの簡単な紹介になります。
確認されましたら順次『次へ』をタッチしてください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

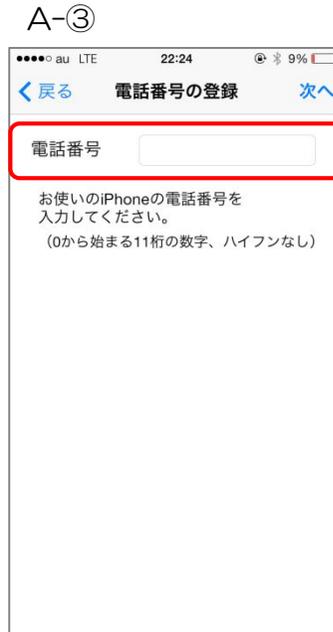

「電話番号」欄に、このiPhoneの電話番号を入力してください。

※ 今、操作しているiPhoneの電話番号を入力してください。


入力し終わったら、『次へ』をタッチしてください。

誤って入力した場合、インストールをし直すこととなります。十分注意してください。

『OK』を押してください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。


B-①

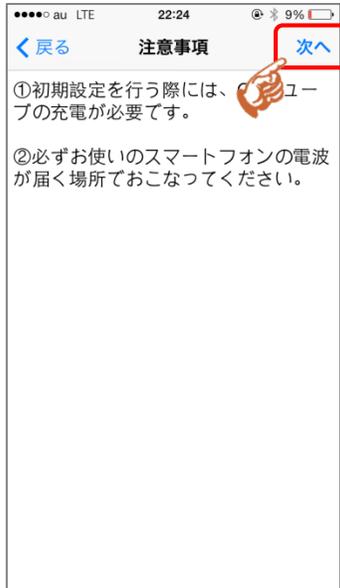

イマココアプリを使って
みましょう。
最初にGPキューブを身
に着ける みまもる方の
登録を行います。

GPキューブが充電器に
セットしてあることを確
認し、『次へ』をタッチ
してください。

B-②

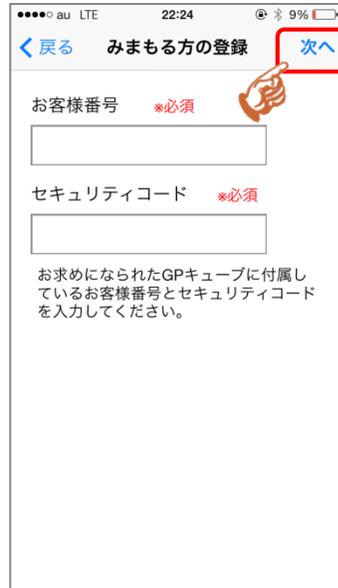

お客様番号とセキュリ
ティコードを入力し、
『次へ』をタッチして
ください。

B-③



『はい』をタッチします。
SMS（ショートメー
ル）を利用しているため、
3円(税抜)の通信料が
かかります。

B-④



『OK』をタッチして
ください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-⑤



本文は絶対に変更しないでください。

SMSのアプリが立ち上がります。
入力されている本文を変更せずにそのまま『送信』をタッチしてください。

B-⑥



しばらくお待ちください。
 電波の状況により、認証に失敗することがあります。
 その場合、電波の届きやすい場所へ移動し、再度実行してください。

B-⑦



「みまもる方のお名前」欄に名前を入力してください。

B-⑧



みまもる方の画像を選択してください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-9



上記は、「標準の画像を選ぶ」を選択した場合です。今回は、おばあちゃんを選択します。

B-10



選択した画像が画面の中央に表示されます。

B-11 ~ B-17 の画面は子機の登録時には表示されません。子機の登録をされている場合は、B-18へ進んでください。(子機の説明に関しては、末尾の用語集をご参照ください。)

B-11



下へスクロールして、「みまもる方の住所」欄に住所を入力してください。番地までの入力でも構いません。入力を終えたら、『次へ』をタッチしてください。※1

B-12



ピンの位置を確認してください。位置が正しくない場合は、正しい位置をタッチしてください。ピンが移動します。確定しましたら、『次へ』をタッチしてください。

※1 『次へ』をタッチしても、「住所が見つかりません」のメッセージが表示されて先に進まない場合は、スマートフォンを再起動させ、最初から入力し直してください。


イマココアプリをインストールする時の操作です。

B-13



確認画面です。表示されている「お名前」、「住所」、地図上のピンの位置に間違いがなければ、『登録』をタッチしてください。


B-14

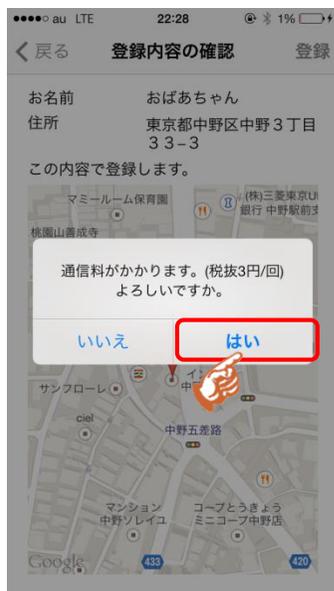

『はい』をタッチします。

SMS (ショートメール) を利用しているため、3円(税抜)の通信料がかかります。

B-15

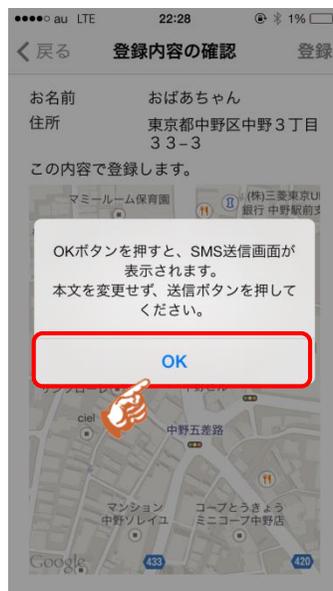

『OK』をタッチしてください。

B-16



本文は絶対に
変更しないで
ください。

SMSのアプリが立ち上がります。
入力されている本文を変更せずにそのまま『送信』をタッチしてください。

イマココアプリをインストールする時の操作です。


B-17



しばらくお待ちください。
最大150秒かかります。

電波の状況により、認証に失敗することがあります。その場合、電波の届きやすい場所へ移動し、再度実行してください。

B-18

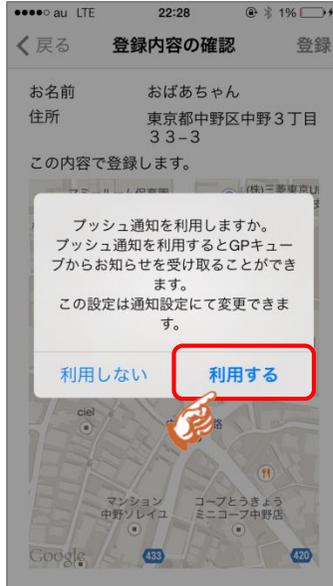


プッシュ通知の利用有無です。『利用する』もしくは『利用しない』を選択してください。あとで変更は可能です。

今回は、『利用する』を選択します。

※プッシュ通知の説明に関しましては、末尾の用語集をご参照ください。

B-19

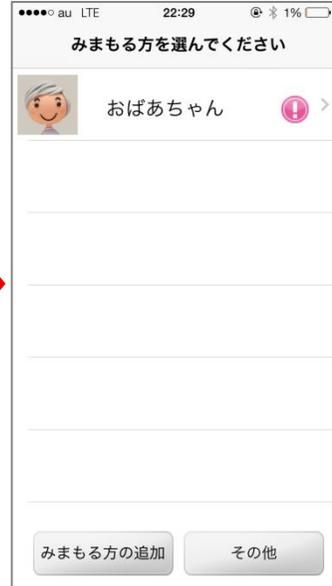

登録されると一覧画面に追加されます、


※ 更にGPキューブを身に着ける方を登録する場合は、『みまもる方の追加』をタッチしてください。P5「B-①」より同一の操作で登録ができます。

位置を確認する

位置を確認するには

みまもる方の最終測位の位置を地図上に表示します。

①

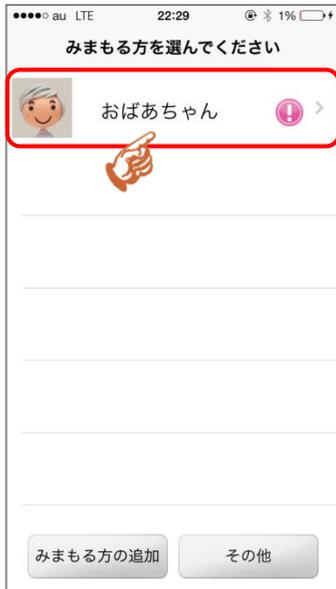

位置を確認したい、みまもる方をタッチしてください。

②



最終測位した位置情報が表示されます。

※ GPキューブが最後に測位できた居場所を地図に表示しています。現在の位置ではありません。

※ GPキューブの電波状況、周囲の建物など測位環境により、実際の位置が大きくずれる場合があります。

【補足説明】

- みまもる方の住所 …
- 最終測位地点 …
- 過去履歴地点 …

過去履歴は、表示有無を設定することができます。
表示は0件から最大9件です。

位置を測位し直すには

みまもる方の最新の位置情報を取得します。



右最上部にある、更新マークをタッチしてください。



『はい』をタッチします。

SMS (ショートメール) を利用しているため、3円(税抜)の通信料がかかります。



『OK』をタッチしてください。



SMSのアプリが立ち上がります。
入力されている本文を変更せずにそのまま『送信』をタッチしてください。

位置の確認・連絡

⑤



測位中です。しばらくお待ちください。

⑥



測位できた場合は、測位された位置情報が表示されます。
測位できなかった場合は、表示される位置情報は変わりません。

※ GPキューブの電波状況により測位に失敗する場合があります。この場合、GPキューブを身に着けた方が、電波状況の良い場所に移動しない限り、測位できません。

※ GPキューブの電池残量が無いと測位することができません。

お知らせ／通知を確認する

GPキューブからのお知らせを確認するには

GPキューブからのお知らせを確認します。



お知らせを確認したい
みまもる方をタッチして
ください。

『みまもる方の情報』を
タッチしてください。

お知らせが新着順に一覧
で表示されます。
(過去50件まで)

【補足説明】



プッシュ通知を「利用する」にしている場合は「!マーク」で、
お知らせがあることを通知してくれます。

こんなときにGPキューブから通知が届きます

- 各種設定で設定した内容が、GPキューブに反映されたとき
(フッシュ通知による通知はありません)
- GPキューブの電池残量がわずかになったとき
- GPキューブの電源が入ったとき
- GPキューブがリセットされたとき、再起動したとき
(電源が入ったときと、同じメッセージになります)
- GPキューブを充電し始めたとき
- みまもる方が移動し始めたとき
- みまもる方が設定時間以上、移動していないとき
- みまもる方が自宅に近付いたとき
- みまもる方が遠出したとき
- みまもる方が長時間外出しているとき

用語集

「親機・子機」とは？


「親機」とは・・・

「親機」はGPキューブの設定をおこなうことができるスマートフォンです。GPキューブ（みまもる方）を最初に登録したスマートフォンが、親機になります。一つのGPキューブに対して一台のスマートフォンしか親機になることができません。

「子機」とは・・・

「子機」は親機同様に、位置情報やお知らせを確認したり、通知を受け取ったりすることはできます。しかし、GPキューブの設定をおこなうことはできません。GPキューブ（みまもる方）を登録した際、すでに他の方によって登録されていた場合は、自動的に子機になります。一つのGPキューブに対して何台でも子機を登録することができます。

【使用例】

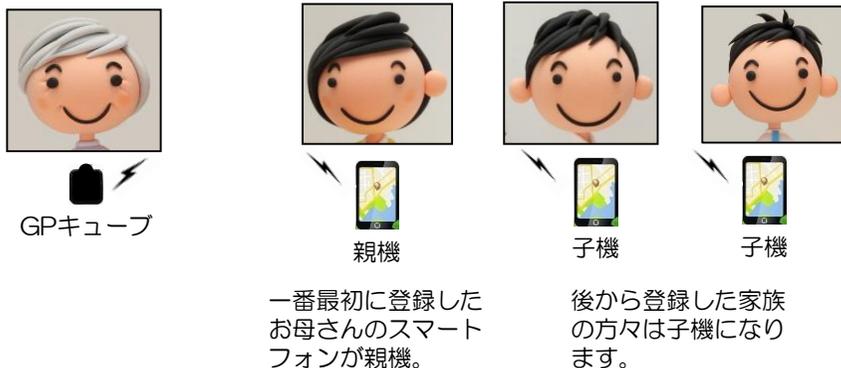

「プッシュ通知」とは？

イマココアプリを起動していないときでも、GPキューブからのお知らせを教えてください。「通知する」、「通知しない」の変更は、いつでも可能です。

